



Piliers Hex-Lock™ Contour



Une solution économique pour des résultats esthétiques.

Les nouveaux piliers *Hex-Lock Contour* de Zimmer Dental représentent une solution simple pour une adaptation immédiate aux divers besoins des patients. Conçus pour être utilisés avec nos systèmes d'implants *Tapered Screw-Vent®* et *Screw-Vent®* dans les cas de restaurations scellées, les piliers *Hex-Lock Contour* simplifient le processus de restauration en réduisant les retouches du pilier. Ils font gagner du temps aux praticiens et laboratoires de prothèse, en offrant une grande souplesse d'utilisation.

Caractéristiques des piliers *Hex-Lock Contour* :

- Congés festonnés (réduction du temps de préparation)
- Grande diversité de hauteurs et profils d'émergence
- Faible hauteur des festons vestibulaires, qui reprennent le profil des tissus mous (moins de risque d'exposition du métal en cas de récession gingivale, meilleur résultat esthétique)
- Contours sous les festons des piliers (plus d'espace autour de l'implant pour les tissus mous, sans compromettre la solidité et le résultat esthétique)
- Possibilité d'utilisation en un ou deux temps chirurgicaux
- Connexion par hexagone interne avec calage par friction

Fiabilité et souplesse d'emploi.

Les piliers *Hex-Lock Contour* sont entièrement compatibles avec la gamme complète des implants *Tapered Screw-Vent* et *Screw-Vent* de Zimmer Dental. Ils contribuent à la résistance de la connexion par hexagone interne avec calage par friction, qui élimine pratiquement tous les micro-mouvements pour une prothèse plus fiable.

Les illustrations ci-contre montrent qu'un contour festonné avec une valeur définie présente une hauteur plus faible en face vestibulaire qu'en face interne. Les hauteurs disponibles sont de 1 mm, 2 mm et 3 mm (face vestibulaire) pour les piliers droits, et de 1 mm et 2 mm pour les piliers angulés à 17°. De plus, les piliers *Hex-Lock Contour* présentent un profil d'émergence plus fin à la base, ainsi que des rainures horizontales au sommet pour une meilleure rétention de la coiffe de transfert. Pour éviter une rotation de chape prothétique, le corps du pilier n'est pas cylindrique mais conique et il comporte une rainure verticale en face interne.



Fig. 1 Vue face vestibulaire.



Fig. 2 Vue face interne.



Fig. 3 Vue latérale.



Fig. 4 Vue en perspective.

Piliers angulés à 17°



| Référence | ZOA341A | ZOA342A | ZOA441A | ZOA442A | ZOA451A | ZOA452A | ZOA561A | ZOA562A |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Diamètre de la plate-forme | 3,5 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
| Profil d'émergence | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
| Hauteur transgingivale | 1,0 mm | 2,0 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 1,0 mm | 2,0 mm |

Piliers droits



| Référence | ZOA341S | ZOA342S | ZOA343S | ZOA441S | ZOA442S | ZOA443S | ZOA451S | ZOA452S |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Diamètre de la plate-forme | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Profil d'émergence | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
| Hauteur transgingivale | 1,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 2,0 mm |



| Référence | ZOA453S | ZOA561S | ZOA562S | ZOA563S |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Diamètre de la plate-forme | 4,5 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
| Profil d'émergence | 5,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
| Hauteur transgingivale | 3,0 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm |

Pour en savoir plus sur les piliers *Hex-Lock Contour*, visitez le site www.zimmerdental.fr ou contactez l'un de nos représentants au 01 45 12 35 35.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

En France 01 45 12 35 35
Télécopie 01 45 60 04 88
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 (0)2 9950 5444
Canada +1 905 567 2073 ou 1 800 265 0968

Espagne +34 93 846 05 43
Israël +972 (0)3 6124242
USA +1 760 929 4300 ou 1 800 854 7019
Autres Pays +1 760 929 4300



zimmer | dental
Confidence in your hands®

Zimmer Dental SAS
2 place Gustave Eiffel
94528 RUNGIS Cedex
France

www.zimmerdental.fr