




Attachements boule et coiffes pour restauration complète

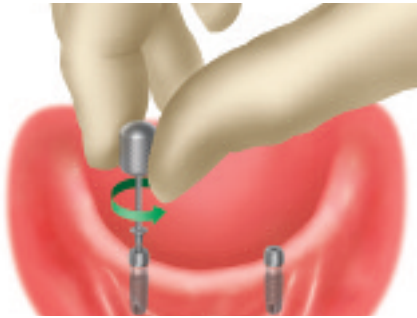

1. Dévisser les coiffes de cicatrisation à l'aide du tournevis 1,25mm.

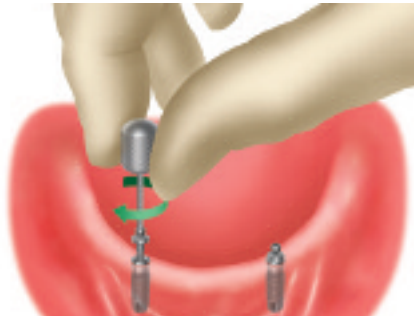


2. Visser les attachements boule sur les implants à l'aide du tournevis 1,25mm. Si les attachements sont vissés définitivement, le serrer à 30 Ncm à l'aide de la clef dynamométrique. Les attachements boule n'engagent pas la connexion dans l'implant.

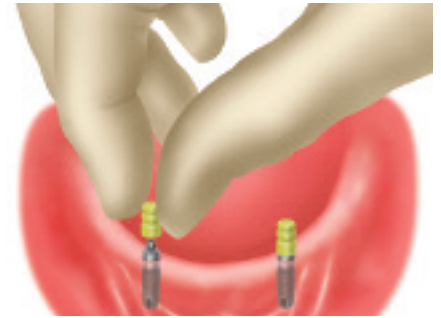


3. Positionner les moignons d'empreinte sur les attachements.



4. Prendre l'empreinte. Les moignons d'empreinte resteront dans l'empreinte.

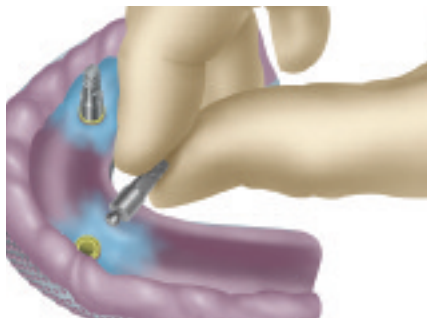

5. Placer les analogues d'attachements boule dans les moignons d'empreinte restés dans l'empreinte, et les envoyer au laboratoire. Les attachements boule peuvent rester en place jusqu'à la finition prothétique, ou être remplacés par les coiffes de cicatrisation.

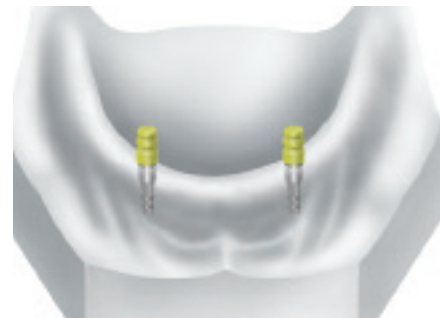

6. Couler le modèle en plâtre dur en utilisant les analogues d'attachements boule.



7. Les moignons d'empreinte sont retirés.



8. Le laboratoire va incorporer dans l'intrados de la prothèse complète les capuchons métalliques et les anneaux nylon qui vont s'adapter sur les attachements boule.



9. Si les attachements boule ne sont pas déjà en place, les visser à 30Ncm à l'aide de la clef dynamométrique. La prothèse définitive est en place.

Remarque : Ce guide est purement informatif.

Se référer aux instructions de Zimmer Dental (référence 4718) pour plus d'informations.

Système d'implants Tapered Screw-Vent



| | Attechements boule (avec capuchon métallique et anneau en nylon) | |
|-------|--|-------------------|
| | Plate-forme Diamètre | Hauteur du pilier |
| BAC2 | 3,5mm | 2mm |
| BAC4 | 3,5mm | 4mm |
| BAC6 | 3,5mm | 6mm |
| BACW2 | 4,5mm | 2mm |
| BACW4 | 4,5mm | 4mm |
| BACW6 | 4,5mm | 6mm |
| BA5C2 | 5,7mm | 2mm |
| BA5C4 | 5,7mm | 4mm |

Système d'implants AdVent



| | Attechements boule (avec capuchon métallique et anneau en nylon) | |
|------|--|-------------------|
| | Plate-forme Diamètre | Hauteur du pilier |
| AVBA | 4,5mm | 1mm |

Utiliser les composants Ø5,7mm pour la plate-forme d'implants *AdVent* de Ø5,7mm



Les implants *Tapered Screw-Vent* comportent un porte-implant/ moignon d'empreinte qui peut être utilisé comme transfert d'empreinte et pilier temporaire.

Système d'implants SwissPlus



| | Attechements boule (avec capuchon métallique et anneau en nylon) | |
|-------|--|-------------------|
| | Plate-forme Diamètre | Hauteur du pilier |
| OPBA | 4,8mm | 1,6mm |
| OPBA3 | 4,8mm | 3mm |

Composants pour empreintes attachelements boule



| | Description |
|-------|--|
| BAT | Moignon d'empreinte pour attachelement boule <i>TSV/AdVent</i> |
| BAR | Analogue d'implant pour attachelement boule <i>TSV/AdVent</i> |
| OPBAT | Moignon d'empreinte pour attachelement boule <i>SwissPlus</i> |
| OPBAR | Moignon d'empreinte pour <i>SwissPlus</i> |

Composants prothétiques d'attachelements boule



| | Description |
|-------|--|
| CA | Capuchon métallique (CAH) et anneau en nylon (CAN) |
| CAH | Capuchon métallique |
| CAN | Anneau en nylon (transparent) |
| CAN-G | Anneau en nylon gris (rétention rigide) |
| CAT | Transfert d'anneau en nylon (jaune) |
| CAS | Système d'attachelement boule pour coiffe |
| CAB | Maquette d'attachelement boule à couler |

Instruments prothétiques



| | Description |
|----------|--|
| THX1.25 | Tournevis manuel hexagonal court avec friction, Ø 1,25mm, 23mm |
| THXL1.25 | Tournevis manuel hexagonal à friction Ø 1,25mm, 27mm |
| HX1.25 | Tournevis hexagonal court Ø 1,25mm, 17mm |
| HXL1.25 | Tournevis hexagonal long Ø 1,25mm, 22mm |
| TW30 | Clé dynamométrique, 30Ncm |
| TW1.25 | Insert hexagonal court pour clé dynamométrique TW20 et TW30 |
| TW1.25L | Insert hexagonal long pour clé dynamométrique TW20 et TW30 |
| CAI | Instruments destinés à l'attachelement boule |

Pour la liste complète des produits et des instruments, merci de vous référer aux catalogues et aux tarifs.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

En France 01 45 12 35 35
Télécopie 01 45 60 04 88
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 2 4297 4182 ou 1800 241 916
Canada +1 800 265 0968 ou 1 905 567 2073

Espagne +34 93 846 05 43
Israël +972 (0)3 6124242
USA +1 760 929 4300 ou 1 800 854 7019
Autres Pays +1 760 929 4300



Zimmer Dental SAS
1, rue Auguste Perret – SILIC 237
94528 RUNGIS Cedex
France