

Empreinte standard



1 : Visser les moignons d'empreinte sur les implants à l'aide du tournevis hexagonal 1,25mm.



2 : Pour une empreinte standard, les vis utilisées ne sont pas émergentes du moignon d'empreinte.



3 : Obturer le puits des vis (avec de la cire par exemple) pour éviter que le matériau à empreinte ne fuse dans celui-ci.



4 : Prendre l'empreinte avec le matériau de moyenne viscosité.



5 : Visser les moignons d'empreinte avec les analogues.



6 : Replacer l'ensemble dans l'empreinte par l'intermédiaire du moignon d'empreinte. L'empreinte est prête pour être envoyée au laboratoire de prothèse pour l'élaboration du modèle en plâtre.

Empreinte pick-up



1 : Pour une empreinte à ciel ouvert (technique pick-up), utiliser les moignons d'empreinte spécifiques avec des vis longues. Visser les moignons d'empreinte sur les implants à l'aide du tournevis 1,25mm.



2 : Utiliser un porte empreinte individuel (P.E.I.), des perforations seront faites en regard des vis.



3 : Prendre l'empreinte avec le matériau de moyenne viscosité. Les vis restent émergentes du porte empreinte individuel.



4 : Avec le porte empreinte (P.E.I.) en place, dévisser les vis.



5 : Après avoir retiré le porte empreinte, assembler les analogues d'implants aux moignons d'empreinte qui sont restés dans l'empreinte.



6 : Visser les moignons d'empreinte aux analogues d'implants à l'aide du tournevis 1,25mm, tout en maintenant l'analogue en place pour prévenir toute rotation du moignon d'empreinte. Envoyer l'empreinte au laboratoire de prothèse.

Remarque : Ce guide est purement informatif.

Consulter les Instructions d'emploi de Zimmer Dental (réf. 4894) et le manuel de restauration avec les systèmes d'implants Tapered Screw-Vent® et Advent® (réf. 4941) pour toutes instructions sur l'utilisation de ces produits.

Prothèses Tapered Screw-Vent



Vis de couverture	
Plate-forme	
TSC	3,5mm
TSCW	4,5mm
TSC5	5,7mm



Coiffes de cicatrisation			
	Plate-forme	PE	Hauteur
THC3/3	3,5mm	3,5mm	3mm
THC3/4	3,5mm	4,5mm	3mm
THC3/5	3,5mm	5,5mm	3mm
THC5/3	3,5mm	3,5mm	5mm
THC5/4	3,5mm	4,5mm	5mm
THC5/5	3,5mm	5,5mm	5mm
THCW3/4	4,5mm	3,5mm	3mm
THCW3/5	4,5mm	5,5mm	3mm
THCW3/6	4,5mm	6,5mm	3mm
THCW5/4	4,5mm	4,5mm	5mm
THCW5/5	4,5mm	5,5mm	5mm
THCW5/6	4,5mm	6,5mm	5mm
TH5C3/6	5,7mm	6,5mm	3mm
TH5C5/6	5,7mm	6,5mm	5mm

Composants prothétiques



Moignon d'empreinte pour technique pick-up		
	Plate-forme	Profil d'émergence
DHT3/3	3,5mm	3,5mm
DHT3/4	3,5mm	4,5mm
DHT3/5	3,5mm	5,5mm
DHT4/4	4,5mm	4,5mm
DHT4/5	4,5mm	5,5mm
DHT4/6	4,5mm	6,5mm



Moignon d'empreinte pour technique standard		
	Plate-forme	Profil d'émergence
HLT3/3	3,5mm	3,5mm
HLT3/4	3,5mm	4,5mm
HLT3/5	3,5mm	5,5mm
HLT4/4	4,5mm	4,5mm
HLT4/5	4,5mm	5,5mm
HLT4/6	4,5mm	6,5mm
HLT5/6	5,7mm	6,5mm



Analogues d'implants	
Plate-forme	
IA3	3,5mm
IA4	4,5mm
IA5	5,7mm



Instruments prothétiques

Description	
HX1.25	Tournevis hexagonal court Ø 1,25mm, 17mm
HXL1.25	Tournevis hexagonal long Ø 1,25mm, 22mm
THX1.25	Tournevis manuel hexagonal court avec friction, Ø 1,25mm, 23mm
THXL1.25	Tournevis manuel hexagonal long avec friction, Ø 1,25mm, 27mm
TW30	Clé dynamométrique 30Ncm
TW1.25	Insert hexagonal court pour clé dynamométrique TW20 et TW30
TW1.25L	Insert hexagonal long pour clé dynamométrique TW20 et TW30



Les implants *Tapered Screw-Vent* sont conditionnés avec un porte-implant / moignon d'empreinte breveté, qui peut être utilisé comme transfert d'empreinte et pilier temporaire.

Cette technique peut également être utilisée avec les systèmes d'implants AdVent® et SwissPlus™.

Pour la liste complète des produits et des instruments, merci de vous référer aux catalogues et aux tarifs.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

En France 01 45 12 35 35
Télécopie 01 45 60 04 88
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 2 4297 4182 ou 1800 241 916
Canada +1 800 265 0968 ou 1 905 567 2073

Espagne +34 93 846 05 43
Israël +972 (0)3 6124242
USA +1 760 929 4300 ou
1 800 854 7019
Autres Pays +1 760 929 4300



zimmer | dental
Confidence in your hands™

Zimmer Dental SAS
1, rue Auguste Perret – SILIC 237
94528 RUNGIS Cedex
France

www.zimmerdental.fr