



Empreinte standard

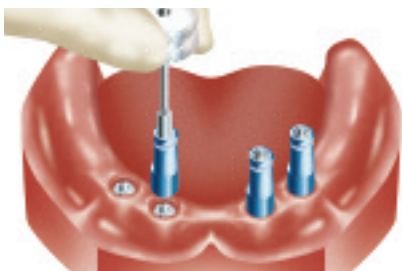


1. Visser les moignons d'empreinte sur les implants avec le tournevis 0.050" (Ø1,25mm).

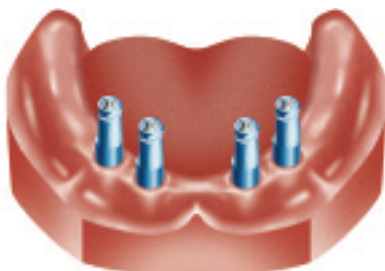

2. Pour une empreinte en technique standard, les vis utilisées ne sont pas émergentes des moignons d'empreinte.



3. Obtenir le pertuis de la vis pour éviter que le matériau à empreinte ne fuse dans celui-ci.

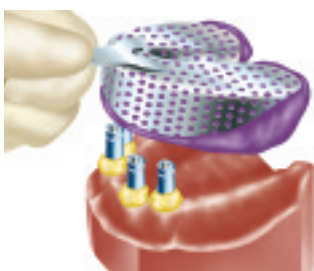

4. Prendre l'empreinte.



5. Visser les moignons d'empreinte avec les analogues.



6. Replacer les moignons d'empreinte solidarisés à leurs analogues dans l'empreinte. Envoyer l'empreinte au laboratoire de prothèse.


Empreinte pick-up



1. Pour une empreinte à ciel ouvert (technique pick-up), utiliser des vis longues. Les visser avec le tournevis 0.050" (Ø1,25mm).



2. Utiliser un porte empreinte individuel (P.E.I.), des perforations seront faites en regard des vis.

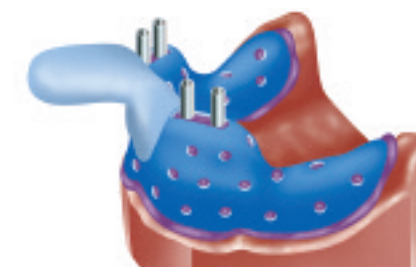

3. Prendre l'empreinte, les vis longues restent émergentes du porte empreinte individuel et dégagées de tout matériau à empreinte sur la partie supérieure.



4. Avec le porte empreinte individuel toujours en place, dévisser les vis.



5. Connecter les analogues aux moignons d'empreinte restés dans l'empreinte.



6. Visser les moignons d'empreinte aux analogues à l'aide du tournevis 0.050" (Ø1,25mm) tout en maintenant l'analogue en place pour éviter toute rotation du moignon d'empreinte. Envoyer l'empreinte au laboratoire de prothèse.

Remarque : Ce guide est purement informatif.

Consulter les instructions d'utilisation de Zimmer Dental (réf. 4894, réf. 4869 et 4718) pour compléter ces informations.

Coiffes de cicatrisation standards et étroites



Coiffes de cicatrisation standards			
	Diamètre plate-forme	Évasement	Hauteur de coiffe
1798	3,25mm	4,5mm	2mm
1799	3,25mm	4,5mm	3mm
1800	3,25mm	4,5mm	5mm
1801	3,25mm	4,5mm	7mm
1806	4,0mm	4,5mm	2mm
1807	4,0mm	4,5mm	3mm
1808	4,0mm	4,5mm	5mm
1809	4,0mm	4,5mm	7mm
1810	4,0mm	5,5mm	2mm
1811	4,0mm	5,5mm	3mm
1812	4,0mm	5,5mm	5mm
1818	5,0mm	6,5mm	2mm
1819	5,0mm	6,5mm	3mm
1820	5,0mm	6,5mm	5mm
1821	5,0mm	6,5mm	7mm



Coiffes de cicatrisation étroites			
	Diamètre plate-forme	Évasement	Hauteur de coiffe
1941	3,25mm	3,75mm	3mm
1942	3,25mm	3,75mm	5mm
1949	4,0mm	4,0mm	3mm
1950	4,0mm	4,0mm	5mm
1945	5,0mm	5,0mm	3mm
1946	5,0mm	5,0mm	5mm

Remarque : Les implants *Spline Twist*[™] de 3,7mm présentent un diamètre de plate-forme de 4,0mm.

Moignons d'empreinte



Moignons d'empreinte standards		
	Diamètre plate-forme	Évasement
1834	3,25mm	4,5mm
1836	4,0mm	4,5mm
1837	4,0mm	5,5mm
1839	5,0mm	6,5mm



Moignons d'empreinte courts		
	Diamètre plate-forme	Évasement
1822	3,25mm	4,5mm
1823	4,0mm	4,5mm
1824	4,0mm	5,5mm
1825	5,0mm	6,5mm



Moignons d'empreinte étroits		
	Diamètre plate-forme	Évasement
1943	3,25mm	3,75mm
1951	4,0mm	4,0mm
1947	5,0mm	5,0mm



Vis de fixation

Description	
1833	Vis de fixation de 18mm pour technique pick-up
1826	Vis de fixation de 13mm de remplacement

Analogues d'implants



Analogues d'implants	
	Diamètre plate-forme
1830	3.25mm
1831	4.0mm
1832	5.0mm

Instruments prothétiques



Description	
0721	Kit de tournevis hexagonaux 0.050" (Ø1,25mm)

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

En France 01 45 12 35 35
Télécopie 01 45 60 04 88
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 2 4297 4182 ou 1800 241 916
Canada +1 800 265 0968 ou 1 905 567 2073

Espagne +34 93 846 05 43
Israël +972 (0)3 6124242
USA +1 760 929 4300 ou 1 800 854 7019
Autres Pays +1 760 929 4300



Zimmer Dental SAS
1, rue Auguste Perret – SILIC 237
94528 RUNGIS Cedex
France